

TAKASIMA



МАССАЖНОЕ КРЕСЛО Venerdi Cosmo



Руководство пользователя

*Наполните каждый день
здоровьем и красотой!*



www.takasima.ru

СОДЕРЖАНИЕ

Введение 3

ПОДГОТОВКА

Важная информация по технике безопасности 4

Внешние структурные компоненты..... 8

Внутренние структурные компоненты..... 9

Схематические изображения механических компонентов..... 10

Список механических компонентов..... 11

УСТАНОВКА

Установка 12

ПРОВЕДЕНИЕ МАССАЖА

Регулировка перед проведением массажа 17

Метод дистанционного управления 19

Инструкция по эксплуатации и графическое изображение функций 23

Что нужно сделать после завершения массажа 25

РАЗНОЕ

Анализ устранения неисправностей..... 26

Технические данные 27

**Просим Вас хранить настоящее Руководство в безопасном месте
для обращения к нему в случае необходимости**

ВВЕДЕНИЕ

1. Уникальное массажное кресло с функцией 3D массажа. Деликатное «интеллектуальное» устройство для массажа спины обеспечивает нежный и комфортный массаж ваших плеч, шеи и талии, словно настоящий профессиональный терапевт-массажист. Также оно обладает функцией сжатия плеч.
2. Функция автоматического распознавания тела. При помощи этой функции кресло настраивает работу массажных роликов под параметры Вашего тела.
3. Автоматическая регулировка. Спинка, сиденье и подставка для ног могут отдельно приводиться в положение нулевой гравитации. Подлокотники могут двигаться назад и вперед одновременно со спинкой.
4. Воздушный массаж. Кресло оснащено функцией массажа обеих рук с помощью встроенных воздушных подушек и дополнительно функцией массажа воздушными подушками в области сидения, ног и ступней в положении нулевой гравитации, что позволяет вам снять напряжение со всего тела.
5. Выдвижная подставка для ног. Эта функция адаптирует кресло под рост человека. Новая функция - добавленные в подставку для ступней ролики обеспечивают фантастический роликовый массаж ваших ступней, снимая усталость.
6. Дистанционное управление при помощи большого цветного флуоресцентного дисплея высокого разрешения (VFD). Дисплей VFD может одновременно показывать части тела, технику и состояние массажа.
7. Инновационная конструкция с применением воздушного массажа. Воздушные подушки в области бедер и поясницы обеспечивают растягивающий, вращательный и крутящий массаж талии в соответствующих точках.
8. Встроенный Mp3 проигрыватель. Mp3 проигрыватель позволяет воспроизводить музыку как через колонки, так и через наушники с U-диска, SD или MMC карт. Музыка в комплексе с массажем позволяет расслабиться и снять психологическое напряжение.
9. Функция прогрева в области поясницы.
10. Массажное устройство для головы с функцией воздушного массажа. Данная функция помогает снять усталость, напряжение и улучшает кровообращение.
11. Уникальная функция растягивания тела. Данная функция позволяет производить полную растяжку всего тела.

Важная информация по технике безопасности

- Внимательно прочитайте данное руководство, чтобы правильно установить массажное кресло и обеспечить его надлежащее функционирование.
- «Инструкция по технике безопасности» снабжена предупреждающими знаками, несущими важную информацию о безопасности.

	Данный символ означает «Предупреждение о возможном причинении смерти или ущерба здоровью»		
	Данный символ означает «Предупреждение о возможном причинении вреда или ущерба имуществу».		
Значение символов			
	Данный символ означает «недопустимое поведение»		Данный символ означает «самостоятельная разборка запрещена»
	Данный символ означает «обязательное соблюдение инструкции по эксплуатации»		Данный символ означает «правильное использование провода питания»

- ✦ • Данный символ означает «правильное использование провода питания»

Важная информация по технике безопасности

 Предупреждение		
	<ul style="list-style-type: none"> • Пациенты, страдающие остеопорозом; • Лица, страдающие сердечными заболеваниями, включая лиц со встроенными кардиостимуляторами и другими встроенными электронными медицинскими устройства; • Беременные женщины или лица с плохим состоянием здоровья должны проконсультироваться с врачом перед использованием кресла; • Использование кресла детьми или лицами, находящимися в состоянии алкогольного опьянения, запрещается; • Запрещается засыпать в кресле. 	Лица, которым противопоказано использование кресла
	<ul style="list-style-type: none"> • Убедитесь, что в момент откидывания назад, поднятия или опускания спинки или подставки для ног или в момент складывания/раскладывания подставки для ног, находящейся в наклонном положении, вокруг кресла, под ним, перед ним и за ним нет детей, домашних животных или иных предметов. • Если вы чувствуете недомогание во время использования кресла, прекратите процесс массажа и проконсультируйтесь с врачом. • Не проводите слишком длительный массаж головы. • Не проводите слишком длительный массаж живота или коленей и будьте осторожны, проводя массаж в области шеи. • Лицам, испытывающим трудности с передвижением и общением, требуется постоянный строгий контроль в ходе проведения массажа. • При массаже спины лучше всего отстегнуть маленькую подушку для талии и убрать ее. 	Несчастный случай/травма
	<ul style="list-style-type: none"> • Вставьте вилку кресла в подходящую сетевую розетку. • Убедитесь, что вилка полностью вошла в розетку, во избежание короткого замыкания или риска возгорания. • Если устройство не используется, отключите его от сети: остановите все массажные функции и перед отключением от сети поверните выключатель в положение «выключено». 	Поражение электротоком и огнем
	<ul style="list-style-type: none"> • Массажные подушки не должны храниться в сложенном положении. 	Повреждение
	<ul style="list-style-type: none"> • Провод электропитания, вилка и розетка не должны использоваться, если их контакты находятся в неплотном или поврежденном состоянии. • Во избежание пожара, поражения электрическим током или поломки не используйте электропитание с напряжением, отличным от указанного. 	Поражение электротоком и огнем
	<ul style="list-style-type: none"> • Если кресло работает неправильно, если имеет место его поломка, если на него была пролита вода то, ремонт устройства должен выполняться в сервисном центре; самостоятельное внесение изменений, разборка или обслуживание кресла запрещены. • Во избежание поражения электрическим током или нанесения вреда здоровью, не открывайте и не разбирайте какие-либо части кресла самостоятельно: ни один из элементов кресла не предназначен для самостоятельного обслуживания клиентом. • Проверьте целостность ткани и кожи на спинке и других частях кресла; если их целостность нарушена, вне зависимости от размера повреждения прекратите использование устройства, отключите питание и обратитесь в ремонтную мастерскую. 	Разборка и обслуживание

Важная информация по технике безопасности

 Предупреждение		
	<ul style="list-style-type: none"> Используйте кресло на плоских ровных поверхностях. 	Во избежание случайного падения
	<ul style="list-style-type: none"> Ставьте кресло на расстоянии в 40 см от стены, чтобы обеспечить достаточно места для наклона спинки. 	Для обеспечения наклонного положения спинки
	<ul style="list-style-type: none"> Максимальное рекомендованное время использования кресла составляет 20 минут. По 5 минут на каждое положение, начиная с легкого массажа. Продолжительный массаж в одном положении может вызвать плохое самочувствие. 	Слишком продолжительный массаж вреден для вашего тела
	<ul style="list-style-type: none"> Чтобы избежать травм, прежде чем сесть в кресло, убедитесь, что массажные головки находятся в правильном положении. 	Во избежание случайных травм
	<ul style="list-style-type: none"> Перед тем, как подключить вилку к розетке, убедитесь, что выключатель находится в положении «выключено». 	
	<ul style="list-style-type: none"> Прежде чем вынуть вилку из розетки, отключите все рукоятки управления. 	Во избежание несчастных случаев во время выключения электропитания
	<ul style="list-style-type: none"> Убедитесь, что вилка полностью вошла в розетку. 	Для снижения риска коротких замыканий и пожаров
<ul style="list-style-type: none"> Проверьте целостность провода, а также отсутствие воды и мусора на нем. 	Во избежание поражения электрическим током во время утечек или повреждений	
<ul style="list-style-type: none"> Обеспечьте правильную прокладку заземляющего провода. Вилка должна быть подключена к розетке с заземлением. Заземление не должно быть изогнуто или обрезано.  		
	<ul style="list-style-type: none"> Не надавливайте руками и не наступайте на массажные головки. Не помещайте руки между работающими массажными головками. Не помещайте руки или ноги между работающими механическими деталями. Не роняйте и не вставляйте никакие предметы в зазоры массажного кресла. Не становитесь, не садитесь и не размещайте никакие предметы на спинке, на подлокотниках или на подставке для ног. Не вставайте на кресле во время использования. Не двигайте кресло во время использования. Не вынимайте вилку из розетки и не выключайте питание кресла во время использования. Не помещайте руки или голову в подставку для ног, находящуюся в наклонном положении. Не используйте массажное кресло во время ношения бигуди. Не садитесь и не давите на спинку, когда кресло находится в наклонном положении. Не производите массаж обнаженной кожи или кожи, покрытой тонкой одеждой, это может вызвать болевые ощущения. 	Во избежание несчастных случаев или травм
	<ul style="list-style-type: none"> Оберегайте кресло от воздействия тепла, влаги, острых предметов и коррозионной, пожароопасной и взрывоопасной среды. Запрещается использование электрических одеял и других обогревательных приборов на кресле. 	Во избежание выцветания, потери цвета обивки или затвердения и износа полиуретана.
	<ul style="list-style-type: none"> Держите кресло подальше от печей и других обогревательных приборов. Не оставляйте кресло на солнце или в местах с высокой температурой. 	
	<ul style="list-style-type: none"> Не используйте кресло на улице. 	

Важная информация по технике безопасности


 Предупреждение		
	<ul style="list-style-type: none"> Пожалуйста, не храните и не используйте кресло во влажной среде, например, у плавательного бассейна или в ванной. Кресло и пульт управления должны всегда оставаться сухими. Не используйте кресло, если у вас влажная кожа. 	Во избежание утечки или поражения электрическим током
	<ul style="list-style-type: none"> Убедитесь, что заземление выполнено правильно (неправильное выполнение может привести к поражению электрическим током. Если вы не знаете, как выполнить заземление, обратитесь к профессиональному электрику). Не используйте переходник для вилки (если прилагаемая вилка не подходит к розетке, не заменяйте ее самостоятельно, а обратитесь к профессиональному электрику.) 	Во избежание поражения электрическим током
	<ul style="list-style-type: none"> Перед чисткой кресла отключите его от сети. После окончания использования кресла отключите его от сети. При перебоях в электропитании отключите кресло от сети. При отключении от сети придерживайте вилку рукой, а не тяните за провод. 	Во избежание поражения электрическим током или пожара
	<ul style="list-style-type: none"> После окончания массажа выключите питание и отключите кресло от сети. 	Во избежание несчастных случаев
	<ul style="list-style-type: none"> При отключении подачи электропитания немедленно отключите кресло от сети. 	Во избежание повреждений или несчастных случаев во время отключения электропитания.

Инструкция по заземлению

- ✦ Кресло оснащено проводом, имеющим провод заземления. Вилка должна быть вставлена в соответствующую розетку, правильно установленную и подходящую для данной вилки.


Замена предохранителя

- ✦ При перегорании предохранителя выключите кресло и отключите его от сети. Откройте крышку, закрывающую предохранитель, расположенную на коробке с переключателями. Замените предохранитель на другой того же размера и закройте крышку. Вы также можете обратиться к электрику для замены предохранителя.

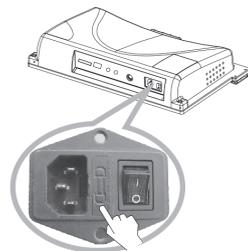

	<p>Места, в которых не разрешено выполнение заземления</p> <p>Газовая труба: может стать причиной пожара или взрыва.</p> <p>Телефонный провод и громоотвод: во время грозы может вызвать поражение электрическим током и пожар.</p> <p>Водопровод: заземление бесполезно в случае пластиковых труб.</p>
---	---


Внешние структурные компоненты

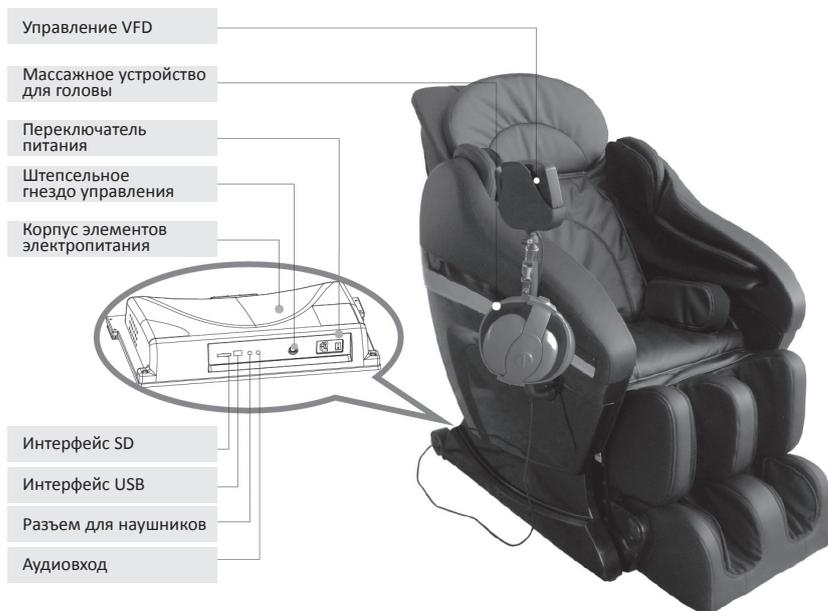

Внутренние структурные компоненты



Схематические изображения механических компонентов

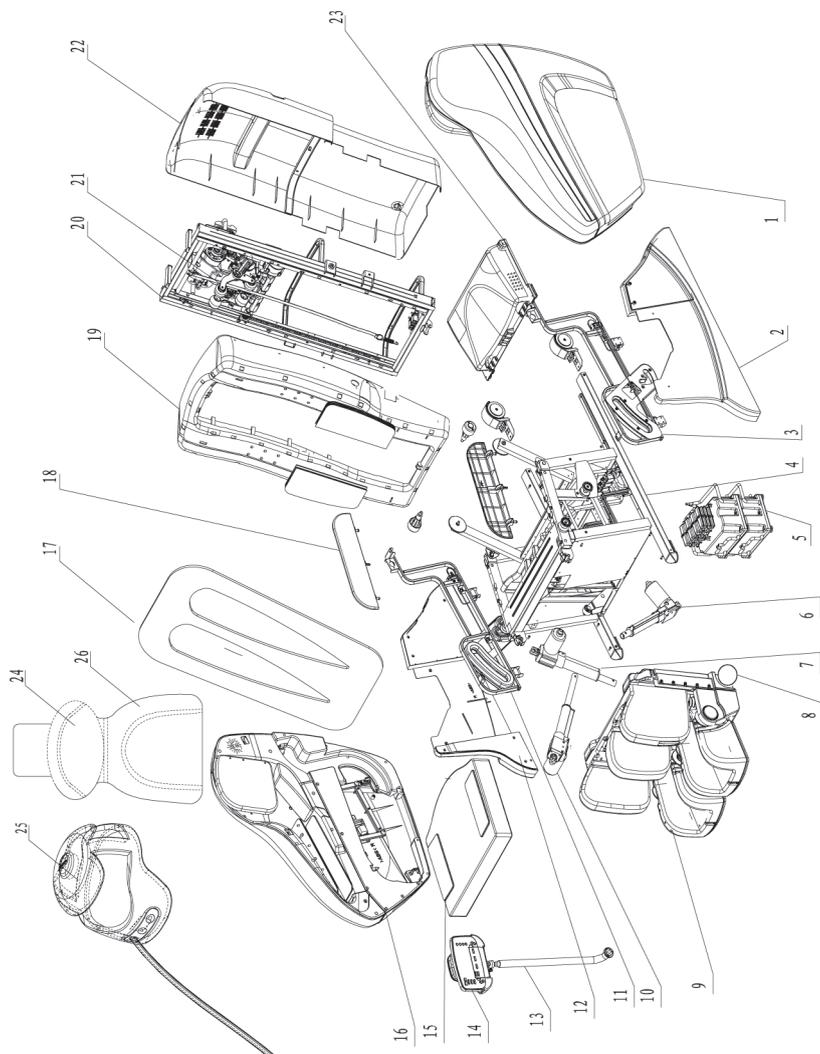


Список механических компонентов

№	Наименование	Кол-во	№	Наименование	Кол-во
1	Левый подлокотник в сборе	1	22	Задняя крышка	1
2	Левая боковая панель	1	23	Корпус электропитания в сборе	1
3	Передвижной блок левого подлокотника	1	24	Подушка	1
4	Сиденье в сборе	1	25	Массажное устройство для головы в сборе	1
5	Газовый лифт	1	26	Подушка для талии в сборе	1
6	Электрический привод сиденья	1			
7	Электрический привод подставки для ног	1			
8	Ролики в сборе	2			
9	Подставка для ног в сборе	1			
10	Электрический привод спинки	1			
11	Передвижной блок правого подлокотника	1			
12	Правая боковая панель	1			
13	Опорная стойка и держатель пульта управления	1			
14	Пульт управления VFD	1			
15	Мат сиденья в сборе	1			
16	Правый подлокотник в сборе	1			
17	Маты спинки	1			
18	Внутренняя панель подлокотника	2			
19	Каркас спинки из пластомера в сборе	1			
20	Задняя рама в сборе	1			
21	Массажное устройство RK07	1			

Этап 1: Распаковка

① Выньте кресло из картонной коробки. Достаньте массажное устройство для головы, основной корпус массажного кресла, подушку сиденья, подушку для спины, прокладку, подушку для талии, боковые воздушные подушки сиденья, защитную прокладку для сиденья, устройство дистанционного управления, держатель устройства дистанционного управления и провод электропитания. Для перемещения кресла требуется как минимум два человека. Сначала обрежьте обвязку, скрепляющую скользящую рукавицу подлокотника с движущейся опорой, затем одной рукой возьмитесь за подножку, а другой – за ролик квадратную трубку спинки, чтобы вытащить кресло.

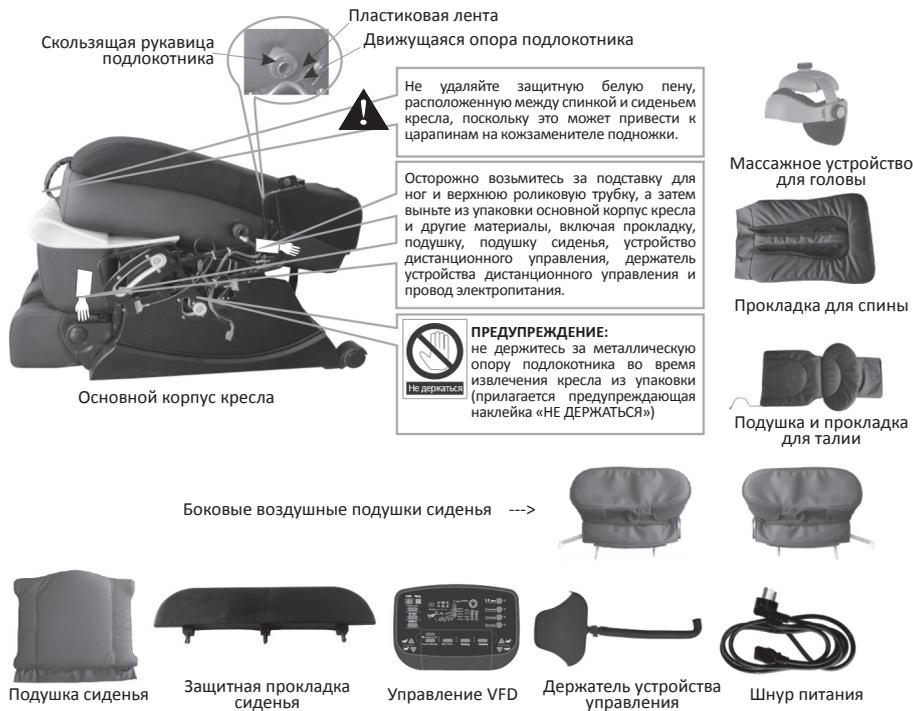

② Выньте из упаковки два подлокотника. Возьмитесь за обе стороны подлокотников и медленно выньте их.



Этап 2: Подъем спинки

Медленно поднимите спинку примерно на 120 градусов, пока не услышите тихий щелчок, оповещающий о том, что спинка закреплена в соединении. Далее соедините левый и правый металлический держатель подлокотника со скользящей рукавицей подлокотника болтом в комплекте. Соедините металлический держатель подлокотника и скользящую рукавицу подлокотника при помощи болта.

(Смотри Рисунок)




Этап 3: Соберите боковые воздушные подушки и защитную прокладку сиденья.

Боковые воздушные подушки сиденья: 1. Извлеките левую и правую боковую воздушную подушку. Поверните их кожаной стороной внутрь, а воздушные трубки установите за ними. Разместите два цилиндрических штифта во втором и в четвертом отверстиях стальной рамы сиденья. 2. Подсоедините воздушные трубки воздушных подушек к раме сиденья. Примечание: Серая воздушная трубка левой воздушной подушки должна быть подсоединена к левой стороне рамы сиденья, а темно-коричневая воздушная трубка правой воздушной подушки – к правой стороне.


Защитная прокладка сиденья: Извлеките защитную прокладку и вставьте цилиндрические штифты в первое, третье и пятое отверстие стальной рамы. Мягкая сторона защитной прокладки должна быть направлена внутрь.

Примечание: Чтобы избежать поломки деталей, не нажимайте на штифты вертикально вниз, пока точно не расположите их напротив отверстий в раме сиденья.

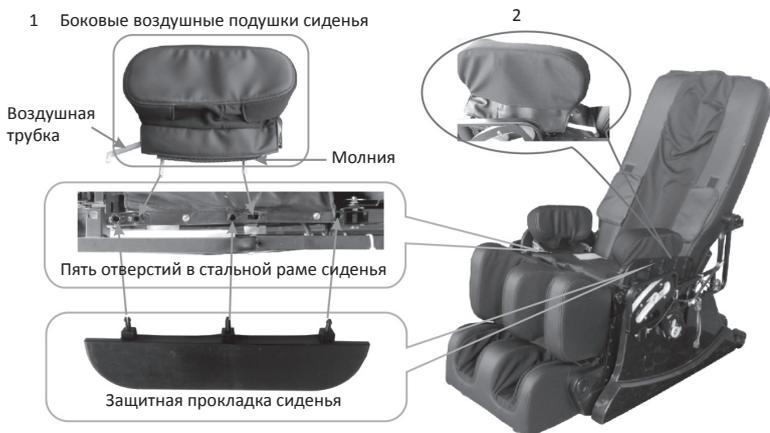

Этап 4: Установка воздушных шлангов сиденья

Подсоедините черные шланги сиденья к шлангам рамы сиденья того же цвета, наденьте липучку на подушку сиденья на соответствующей части рамы, застегните на молнию боковые воздушные подушки и установите подушки сиденья.

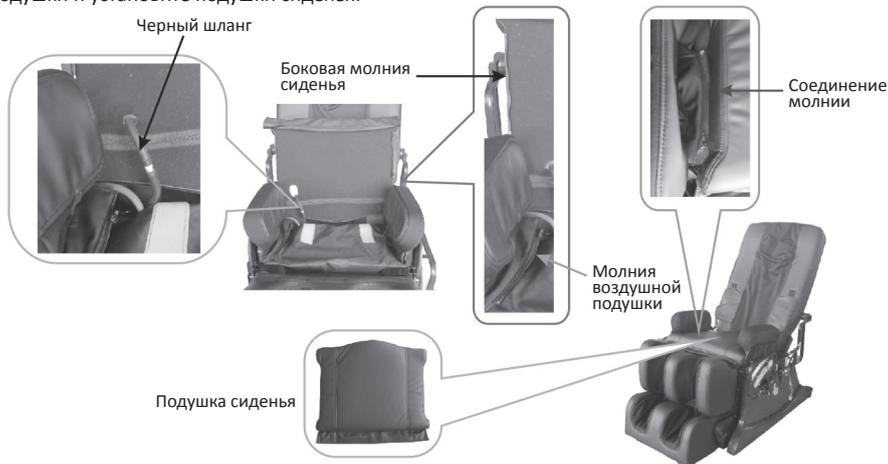

Этап 5: Установка подушки для спины, прокладки для головы и подвижной маленькой прокладки

1. Соедините подушку для спины со спинкой при помощи молний.
2. Установите головную прокладку в верхней части спинки при помощи липучки.
3. Две термические вставки должны проходить через два отверстия в правой части подушки сиденья; выньте шланги соединений, затем свободно подсоедините две термические вставки к подвижной прокладке и к подушке для спины.

⚠ Примечание: Подвижную прокладку с функцией обогрева, пристегнутую сзади, следует отсоединить от подушки для спины, во избежание травм или несчастных случаев во время работы устройства для массажа спины.



Этап 6: Установка подлокотников

1. Поместите установочный стержень в заднюю часть подлокотника в отверстие в передвижном блоке.
2. Соедините коннектор с трубкой подлокотника.
3. Поместите установочный стержень в отверстие в передней части передвижного блока подлокотника.
4. Придерживая подлокотник, надавите внутрь. Установка будет закончена, когда вы услышите щелчок.
5. Установите другой подлокотник, используя описанный выше метод.

Советы (разборка подлокотников): Одной рукой потяните за стяжку вращающейся панели за подлокотником, другой рукой одновременно выньте подлокотник из оси фиксации. Извлеките установочный стержень из передней части подлокотника, затем ослабьте коннектор, извлеките установочный стержень из задней части подлокотника. Разборка завершена.




Этап 7: Установка держателя устройства дистанционного управления, устройства дистанционного управления и массажного устройства для головы

1. Установите держатель устройства управления в правый подлокотник при помощи трех винтов M5*15, винты закройте резиновыми колпачками. Установите устройство управления на держатель, провод поместите в зажим, расположенный за правым подлокотником.
2. Соедините скобу массажного устройства для головы со скобой держателя и повесьте массажное устройство для головы на держатель.
3. Откройте прокладку для головы, соедините внешний короткий шланг массажного устройства для головы с коричневым шлангом, расположенным в верхней части спинки.



Этап 8: Завершение установки

1. Подсоедините вилку устройства дистанционного управления и вилку электропитания к соединительному разъему корпуса питания, расположенному под спинкой. **(Смотри Рисунок)**
 - А. Отверстие для вилки устройства дистанционного управления
 - В. Разъем для вилки электропитания
 - С. D. При использовании наушников, подключите их к соответствующему разъему. **(Смотри Рисунок)**
 - Е. Вставьте USB устройство в разъем для USB
 - F. Вставьте кардридер для карт SD или MMC в дисковод.
2. Подключите дополнительную вилку электропитания к розетке
3. Включите питание (нажмите 1 на переключателе «0/1», после чего загорится индикатор)
4. Используйте устройство дистанционного управления для выбора режима массажа и наслаждайтесь приятными ощущениями.

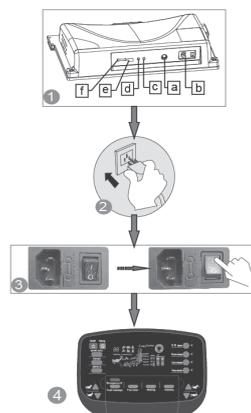

ПРОВЕДЕНИЕ МАССАЖА

Регулировка перед проведением массажа

Среда

⚠ Предупреждение	
	Не использовать вблизи плавательных бассейнов или ванных комнат и в других местах с повышенной влажностью во избежание протечек и поражения электрическим током.
	Не использовать под воздействием солнечного света, вблизи печей или в других помещениях с высокой температурой, во избежание порчи обивки.
	Использовать кресло на ровных поверхностях во избежание его падения, шума или других ненужных проблем.

Проверка пространства вокруг кресла

Убедитесь, что при откинутой спинке и выдвинутой подставке для ног вокруг кресла не находятся люди, домашние животные или какие-либо предметы.



Проверка провода электропитания и вилки

1. Удаляйте пыль с розетки (при помощи сухой ткани)
2. Не допускайте повреждений провода, скручивания, растягивания или сдавливания тяжелыми предметами (особенно придавливания креслом).



Проверка среды

Пространство для использования кресла

- Не менее 40 см от спинки до стены.




- Не менее 40 см свободного пространства перед подножкой.

Проверка окружающей обстановки

При наклоне спинки или подставки для ног, выдвигении подставки для ног и передвижении сиденья, обратите внимание на:

1. Отсутствие людей или предметов во всех направлениях
2. Наличие необходимого свободного пространства

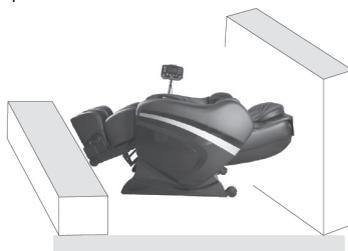

ПРОВЕДЕНИЕ МАССАЖА

Регулировка перед проведением массажа

Как перемещать кресло



Предупреждение



- Не перемещайте кресло во время работы во избежание несчастных случаев и травм

Как перемещать кресло

Свяжите кабели вместе и поместите их на сиденье во избежание их повреждения во время передвижения.

- Если вы уроните кресло, может произойти повреждение его внутренних компонентов.
- Не используйте ролики на деревянном полу или на любом другом легко повреждающемся покрытии. Для поднятия кресла требуются 2 или более человек.
- Не трясите ножки кресла, это может привести к его повреждению.
- Убедитесь, что вы отключили кресло от сети, и что вилка не касается пола (лучше всего оставить кресло в стоячем положении, чтобы избежать повреждения пола спинкой кресла)



В условиях обычной эксплуатации

1. Один человек поднимает ножки кресла до определенной высоты и продолжает поднимать, пока центр тяжести не перейдет на ролики, затем катит кресло до места назначения и опускает его.



Держите кресло за подножку при перемещении, как показано на рисунке, чтобы избежать появления царапин на кожзаменителе.

2. Два человека держат кресло за два подлокотника, поднимают его и передвигают до места назначения.



Регулировка перед массажем

Перед регулировкой

- Убедитесь, что массажная головка находится в правильном положении (чтобы избежать удара головой о массажный ролик), и сядьте.



Проверка положения плеч

- Если при проверке высоты плеч кресло не может «обнаружить» Ваши плечи, его высота допустима. Правильное положение: сядьте и плотно прижмите спину к спинке кресла, голова должна располагаться на опорной головной подушке. Правильная поза поможет правильно измерить высоту верхней части тела. В ходе проверки высоты тела, массажный ролик будет мягко передвигаться по направлению к низу спинки, пока не дойдет до предельного положения, затем он поднимется вверх для проверки высоты плеч.



Предупреждение: следует снять с задней подушки съемную подушку с функцией подогрева, пристегнутую на молнию к спинке кресла во избежание повреждений или травм при работе устройства для массажа спины

Советы




- Если Вы ощущаете недостаточную интенсивность массажа, снимите подушку или прокладку.

- Поскольку кресло достаточно тяжелое, со временем оно может повредить напольное покрытие. Чтобы защитить пол, подстелите под кресло ковер или другой мягкий материал.



Метод использования устройства дистанционного управления

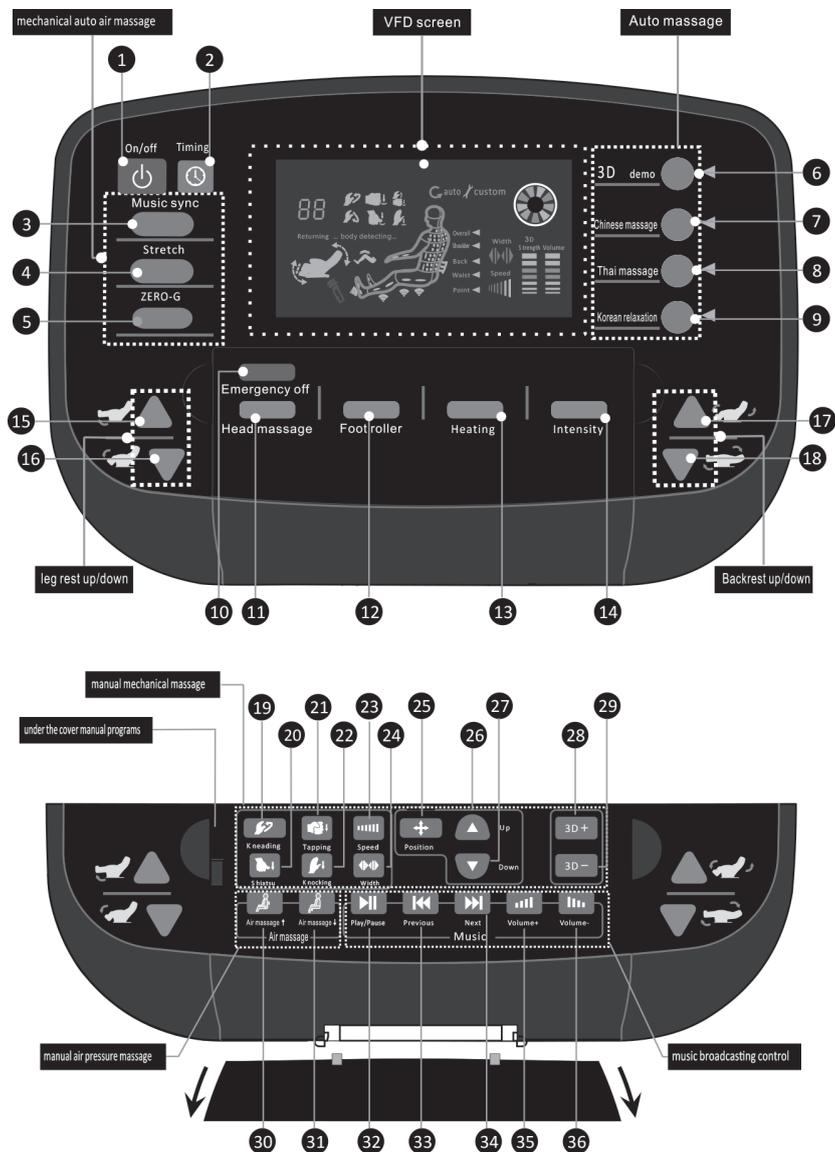

Использование пульта дистанционного управления

 On/off	<p>1. On/off (вкл./выкл.) Подключите электропитание; нажмите кнопку вкл./выкл.; кресло будет находиться в режиме ожидания; при этом доступен выбор автоматического/ручного управления; нажмите любую кнопку для проверки высоты верхней части кресла, спинка кресла соответствующим образом откидывается; затем становится доступен полностью автоматический режим; повторно нажмите ту же кнопку; выполнение массажа прекратится, и массажный механизм продвинется к верхней части спинки кресла.</p>
 Timing	<p>2. Timing (регулировка времени). После нажатия кнопки вкл./выкл. рабочее время составляет по умолчанию 20 минут; используйте кнопку «Timing», чтобы настроить рабочее время в диапазоне от 10 до 30 минут; продолжительность демоверсии составляет 5 минут, по истечении которых массажный механизм продвинется к верхней части спинки кресла, а спинка кресла вернется в исходное положение.</p>
 Music sync	<p>3. Music sync (синхронизация с музыкой). При нажатии кнопки «Music sync» интенсивность массажа в виде поглаживания и похлопывания будет согласовываться с настройками громкости и мелодии; одновременно будет работать и воздушный массаж; повторно нажмите кнопку для деактивации режима синхронизации.</p>
 Stretch	<p>4. Stretch. Нажмите кнопку «Stretch» для запуска воздушного массажа; одновременно будет осуществляться и массаж спины; повторно нажмите кнопку для деактивации режима воздушного массажа.</p>
 ZERO-G	<p>5. ZERO-G (нулевая гравитация). Нажатие кнопки «ZERO-G» приводит кресло в положение нулевой гравитации; снова нажмите эту кнопку, и спинка кресла максимально откинется назад; ещё одно нажатие кнопки приводит спинку кресла в сидячее положение.</p>
 3D demo	<p>6. 3D demo (демонстрация 3D-массажа). Нажмите кнопку «3D demo», чтобы насладиться трёхмерным массажем спины; повторное нажатие кнопки деактивирует режим трёхмерного массажа.</p>
 Chinese massage	<p>7. Chinese massage (китайский массаж). Нажмите кнопку «Chinese massage» для включения целебного китайского массажа; повторным нажатием кнопки эта функция отключается.</p>
 Thai massage	<p>8. Thai massage (тайский массаж). Нажмите кнопку «Thai massage» для включения массажа в тайском стиле; повторное нажатие кнопки отключает этот режим.</p>
 Korean relaxation	<p>9. Korean relaxation (корейская релаксация). Нажмите кнопку «Korean relaxation» для включения массажа в корейском стиле; повторное нажатие кнопки отключает этот режим.</p>
 Emergency off	<p>10. Emergency off (аварийное отключение). Для отключения всех функций нажмите кнопку «Emergency off».</p>
 Head massage	<p>11. Head massage (массаж головы). Нажмите кнопку «Head massage» для запуска воздушного массажа головы, при этом одновременно может осуществляться также и массаж спины; для отключения данной функции повторно нажмите кнопку.</p>
 Foot roller	<p>12. Foot roller (роликовое массажное устройство для стоп). Во время воздушного массажа нажмите кнопку «Foot roller» для осуществления роликового массажа области стоп; для отключения данной функции повторно нажмите кнопку.</p>
 Heating	<p>13. Heating (обогрев). Во время воздушного массажа нажмите кнопку «Heating», чтобы включить функцию прогрева поясницы; система обогрева по Вашему выбору может работать в четырёх режимах: «интенсивный», «умеренный», «слабый» и «отключено».</p>
 Intensity	<p>14. Intensity (интенсивность). Нажмите эту кнопку для настройки интенсивности воздушного потока.</p>
 	<p>15. При нажатии этой кнопки подставка для ног начнет подниматься; отпустите кнопку, и подставка остановится в данном положении.</p>
 	<p>16. При нажатии этой кнопки подставка для ног начнет опускаться; отпустите кнопку, и подставка остановится в данном положении.</p>


Использование пульта дистанционного управления

	17. При нажатии этой кнопки спинка кресла начнёт подниматься, а подставка для ног – опускаться; отпустите кнопку, спинка кресла перестанет подниматься, а подставка остановится в заданном положении.
	18. При нажатии этой кнопки спинка кресла начнёт откидываться назад, а подставка для ног – подниматься; отпустите кнопку, спинка кресла перестанет опускаться, а подставка остановится в заданном положении.
 Kneading	19. Kneading (разминание). Нажмите кнопку «Kneading» для запуска разминающего массажа; повторное нажатие кнопки отключает данную функцию; разминание может сочетаться также с другими массажными функциями.
 Shiatsu	20. Shiatsu (шиацу). Нажмите кнопку «Shiatsu» для запуска массажа шиацу; повторное нажатие кнопки отключает массаж шиацу.
 Tapping	21. Tapping (постукивание). Нажмите кнопку «Tapping» для запуска массажа постукиванием; повторное нажатие кнопки отключает данный вид массажа.
 Knocking	22. Knocking (поколачивание). Нажмите кнопку «Knocking» для запуска поколачивающего массажа; повторное нажатие кнопки отключает поколачивающий массаж.
 Speed	23. Speed (скорость). В режиме ручного управления во время осуществления поглаживающего, похлопывающего или постукивающего массажа, а также во время выполнения синхронизации с музыкой, нажмите кнопку «Speed» для регулировки скорости массажа в указанных режимах.
 Width	24. Width (ширина). В режиме ручного управления во время постукивающего и похлопывающего массажа, а также массажа шиацу нажмите кнопку «Width» для регулировки расстояния между массажными роликами.
 Position	25. Position (область массажа). Нажмите кнопку «Position» для выбора области массажа (вся спина, плечи, спина, поясница, точечный массаж).
 Up	26. Up (вверх). В режиме точечного массажа нажмите кнопку «Up» для легкой регулировки расположения массажных роликов.
 Down	27. Down (вниз). В режиме точечного массажа нажмите кнопку «Down» для легкой регулировки расположения массажных роликов.
 3D+	28. 3D+. В режиме ручного управления нажмите и удерживайте кнопку «3D+», чтобы массажный механизм выдвинулся вперёд и создал более яркие ощущения; отпустите кнопку, и массажный механизм примет стандартное положение 3D.
 3D-	29. 3D-. В режиме ручного управления нажмите и удерживайте кнопку «3D-», чтобы массажный механизм отодвинулся назад и создал менее яркие ощущения; отпустите кнопку, и массажный механизм примет стандартное положение 3D.
 Air massage ↑	30. Air massage ↑ (воздушный массаж ↑). Нажмите кнопку «Air massage ↑» для включения/выключения давления воздуха в подлокотниках, области поясницы и сидения.
 Air massage ↓	31. Air massage ↓ (воздушный массаж ↓). Нажмите кнопку «Air massage ↓» для включения/выключения давления воздуха в области голени и стоп.
 Play/Pause	32. Play/pause (играть/пауза). Нажмите кнопку «Play/pause», чтобы насладиться музыкой; при повторном нажатии кнопки музыка выключается.
 Previous	33. Previous (назад). Нажмите кнопку «Previous», чтобы прослушать предыдущую композицию.
 Next	34. Next (вперёд). Нажмите кнопку «Next», чтобы прослушать следующую композицию.
 Volume+	35. Volume+ (громкость+). Нажмите кнопку «Volume+», чтобы прибавить громкость музыки.
 Volume-	36. Volume- (громкость-). Нажмите кнопку «Volume-», чтобы уменьшить громкость музыки.

ПРОВЕДЕНИЕ МАССАЖА

Использование пульта дистанционного управления

VDF отображение экрана

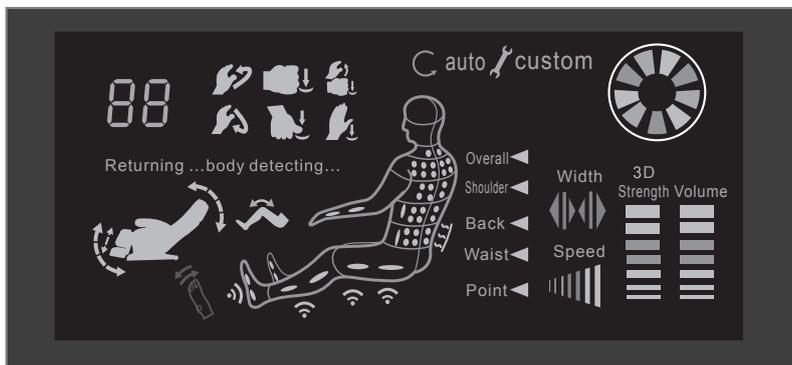

88


Цифровой дисплей: дисплей показывает "=", когда находится в режиме ожидания; если питание включено, он показывает оставшееся рабочее время.

- ви́ннлф**
- **Kneading**
Разминание
 - **Tapping**
Постукивание
 - **Pressing**
Надавливание
 - **Knocking**
Поколачивание

- Автоматический массаж
- Выбор массажа



В автоматическом режиме оранжевый, зелёный и голубой цвета показываются по очереди

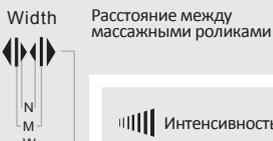

Спинка кресла вверх/вниз

Подставка для ног вверх/вниз

Возвращение...

Означает истечение времени массажа или указывает на восстановление положения кресла.

Определение параметров тела...

Означает, что кресло осуществляет сканирование тела и определение его формы.

Растяжка ног

Означает, что включён режим растяжки ног.

Точка давления воздуха



Нагревательный элемент в области поясницы



Ролик и воздушный массаж в области стоп

Массажное устройство из 4 роликов

Интенсивность воздушного массажа



Индикатор:

- Overall ◀ полный массаж
- Shoulder ◀ массаж плеч
- Back ◀ массаж спины
- Waist ◀ массаж поясницы
- Point ◀ точечный массаж

Инструкция по эксплуатации и графическое изображение функций Включение/выключение



Шаг 1. Включение питания.

- 1 Подключите вилку пульта управления к разъёму «А».
- 2 Подключите вилку провода питания к разъёму «В».
- 3 Вставьте вилку в розетку.
- 4 Поставьте находящийся под массажным креслом тумблер в активное положение, при этом пульт перейдёт в режим ожидания " = = ". Если в течение двух минут не будет нажата ни одна кнопка, кресло переходит в энергосберегающий режим ожидания.
- 5 Нажмите кнопку включения питания на пульте управления.


Шаг 2. Массаж.

- 1 Выберите массажную функцию в соответствии с инструкцией по эксплуатации к пульту управления. Обратитесь к инструкции по эксплуатации пульта управления для уточнения информации по функциям массажа.
- 2 По истечении заданного времени массаж прекращается, но кресло остаётся в прежнем положении, находясь в режиме ожидания " = = ". Если в течение двух минут не будет нажата ни одна кнопка, кресло переходит в энергосберегающий режим работы.



Шаг 3. Выключение питания.

- 1 Нажмите кнопку вкл./выкл. на пульте управления для отключения устройства, массажное кресло выключится автоматически.
- 2 После остановки массажных роликов в исходном положении выключите расположенный под креслом выключатель питания.
- 3 Выньте вилку из розетки.

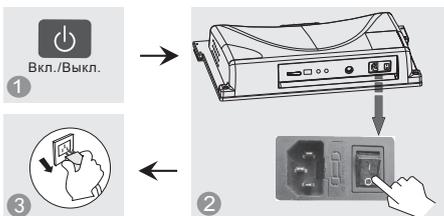

! Перед использованием кресла снимите мат-подушку и задний мат для проверки спинки и других элементов кресла; убедитесь в отсутствии; при обнаружении любых повреждений выключите питание и свяжитесь отделом послепродажного обслуживания.

- 1 **!** Перед тем как сесть в кресло, убедитесь, что на кресле (включая подлокотники, подставку для ног, спинку и сиденье) нет посторонних предметов.
- 2 Садитесь только после того, как убедитесь, что кресло находится в исходной позиции.
- 3 Не вставайте на кресло во время его использования.

ПРОВЕДЕНИЕ МАССАЖА

Инструкция по эксплуатации и графическое изображение функций

● Опускание спинки кресла

Нажмите кнопку «DOWN» на пульте, в результате одновременно произойдёт опускание спинки кресла и подъём подставки для ног. Если отпустить эту кнопку, спинка кресла и подставка для ног зафиксируются под определённым углом.



● Подъём спинки кресла

Нажмите кнопку «UP» на пульте, в результате одновременно произойдёт подъём спинки кресла и опускание подставки для ног. Если отпустить эту кнопку, спинка кресла и подставка для ног зафиксируются под определённым углом.



● Подъём подставки для ног

Нажмите кнопку «UP» подставки для ног на пульте, и подставка для ног плавно поднимется. Если отпустить эту кнопку, подставка для ног зафиксируется под определённым углом.



● Опускание подставки для ног

Нажмите кнопку «DOWN» подставки для ног на пульте, и подставка для ног плавно опустится. Если отпустить эту кнопку, подставка для ног зафиксируется под определённым углом.



● Диапазон хода подставки для ног

Подставка для ног может выдвигаться и задвигаться на 200 мм.



● Массаж рук и массаж плеч

Поместите руки между воздушными подушками для рук и плеч перед тем, как встроенные воздушные подушки наполнятся воздухом. Нажмите соответствующую кнопку для запуска массажа рук и плеч.



● Массаж головы

Отдельно в кресле предусмотрено массажное устройство для головы, обеспечивающее комфортный воздушный массаж головы и снимающее её усталость.



● Функция обогрева

Нагревательный элемент размещён в нижней части спинки кресла; имеется также дополнительная съёмная прокладка, которую необходимо убирать с подушки для спины, если Вы собираетесь делать массаж спины. Подкладку следует использовать для области живота или ног.



● Функция деликатного трёхмерного массажа

1. Откройте защёлкивающуюся крышку на пульте, нажмите Поглаживание, Постукивание, Похлопывание для запуска соответствующих режимов; нажмите на кнопку интенсивности для регулировки силы воздействия, нажмите на кнопку ширины для установки большего, среднего или малого расстояния между массажными роликами.

2. Используйте кнопки 3D+ и 3D- для регулировки движения массажного механизма вперед и назад.



1. Съёмную прокладку с функцией обогрева, застёгивающуюся сзади на молнию, необходимо во время работы массажного механизма спины снимать с подушки спины во избежание травм и несчастных случаев.
2. Убедитесь в отсутствии домашних животных, людей или предметов в непосредственной близости от кресла при подъёме и опускании спинки и подставки для ног во избежание травм либо ущерба имущества.
3. Избегайте зажатия рук в щели между спинкой и подлокотниками при регулировке спинки.
4. Нельзя вставать и покидать сиденье во время изгиба ноги на подставке для ног, а также пытаться остановить работу подставки для ног, это может причинить травму или привести к поломке кресла.
5. Для получения более подробной информации внимательно изучите руководство к пульту управления.

Что нужно сделать после завершения массажа

Выключение массажного кресла

1 Убедитесь в отсутствии домашних животных, людей или предметов в непосредственной близости от спинки и подставки для ног.



2 Верните спинку кресла и подставку для ног в исходное положение путём нажатия соответствующей кнопки (или нажмите кнопку вкл./выкл.)



3 После того, как кресло вернулось в исходное состояние, вставьте пульт дистанционного управления в держатель.




4 Поместите мат для спины и мат-подушку на спинку кресла.

5 Выключите питание.



6 Выньте вилку электропитания из розетки (Внимание: держите вилку правильно).

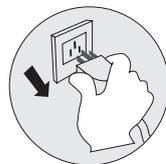

7 При необходимости произведите чистку кресла.



Осторожно!

- Когда вы хотите остановить массаж, нажмите кнопку вкл./выкл. для прекращения всех массажных функций и подождите, пока массажное устройство вернётся в положение хранения. Для предотвращения несчастных случаев с детьми и животными после остановки массажа убедитесь, что питание выключено.
- После использования устройства отключите питание и выньте вилку из розетки. Во избежание повреждений не допускайте попадания влаги и пыли на изоляционную поверхность, а также ее износа.

Устранение неисправностей

Часто задаваемые вопросы и устранение неисправностей

Неисправность	Возможная причина неисправности	Меры по устранению неисправности
Массажное кресло не работает после включения питания	Проверьте, включено ли устройство управления	Включите тумблер устройства управления
	Не выбрана функция массажа	Выберите функцию массажа
	Проверьте контакт между вилкой и розеткой	Убедитесь, что вилка включена в розетку
	Повреждение провода или вилки	Замените кабель или вилку у производителя, в авторизованном сервисном центре или у аккредитованного специалиста
	Предохранитель перегорел	Замените предохранитель на другой того же типа
	Неисправность внутренней электрической цепи	Свяжитесь со специальным авторизованным ремонтным центром или с аккредитованным специалистом для проверки и ремонта
В процессе работы кресла слышен посторонний высокий звук	Звук воздушного насоса, мотора и механических компонентов	Это естественные звуки, можно не обращать на них внимания
Различная высота правого и левого роликов	Массажные ролики работают со сдвигом	Это нормальное, можно не обращать на это внимания
В процессе работы кресла звук внезапно стал значительно громче	Проверьте, не может ли это быть последствием длительного времени работы	Выключите питание и оставьте массажное кресло в нерабочем состоянии на 30 минут перед последующим включением
	Обычно это может быть вызвано износом внутренних компонентов вследствие длительной работы	Обратитесь к аккредитованному специалисту по ремонту для проверки и ремонта
Массажная функция внезапно выключилась во время работы	Внезапный перебой в питании	Включите питание снова
	Заданное время работы истекло	Выключите питание и оставьте массажное кресло в покое на 30 минут перед последующим его использованием
Ни спинка, ни подставка для ног не раскладываются	Проверьте, нет ли каких-нибудь препятствий для этого; кресло перегружено; иногда из соображений безопасности массажное кресло может автоматически останавливаться	Удалите препятствия; выключите питание и оставьте массажное кресло на 30 минут перед последующим его использованием

Часто задаваемые вопросы и устранение неисправностей

Кресло не может вернуться в исходное положение	Чрезмерная эксплуатация; заданное время истекло	Обратитесь к аккредитованному специалисту по ремонту для проверки и ремонта
Пульт управления перегревается	Длительное время использования	Если перегревание значительное, прекратите использование пульта и свяжитесь с авторизованным сервисным центром для проверки и ремонта
Провод питания или вилка чересчур нагреваются	Работа с перегрузкой	Выключите питание и оставьте массажное кресло на 30 минут перед последующим его использованием
	Другие причины	Прекратите использование и свяжитесь с аккредитованным специалистом для ремонта
Не функционирует воздушная подушка	В процессе установки были пережаты трубки подачи воздуха	Произведите переустановку подлокотников, избегая перегиба трубок
	Некачественно закреплено соединительное устройство	Произведите переустановку подлокотников, надёжно закрепив соединительное устройство



Примечание: Если вышеупомянутые советы не помогли, отключите питание кресла при помощи тумблера на внешней стороне правого подлокотника, выньте вилку из розетки и свяжитесь с вашим дилером или с нашей компанией для ремонта или обслуживания.

Технические параметры

Наименование	Массажное кресло Venerdi Cosmo	Мощность (ватт)	280
Тип	RK 7803	Масса/ нетто(кг)	Основная часть: 106/121 Подлокотники: 27/34
Входящее напряжение	AC 120В, 60 Гц AC 220В, 50/60 Гц AC 240В, 50 Гц	Размеры упаковки (см)	139x77x88 (упаковка основной части) 106x44x95 (упаковка подлокотников)
Класс безопасности	Класс I		

TAKASIMA

ООО «Медберри»

198095, Санкт-Петербург,
ул. Розенштейна, 21, лит. А, оф. 508

Телефон: +7 (812) 385-57-66

125362, Москва, ул. Водников, 2, стр.4

Телефон: +7 (495) 215-14-90

E-mail: office-medberry@medberry.ru

Бесплатный звонок для абонентов РФ:

Телефон: 8 (800) 555-3-800



www.takasima.ru